

## 檢驗科檢體容器使用指南

容器名稱	圖示	添加物	適用檢驗項目	注意事項/補充說明
血液培養瓶		Soybean-Casein Digest Broth, Amino Acids, SPS, Vitamins, Antioxidants/Reductants, Nonionic Adsorbing Resin, Cationic Exchange Resin	細菌、酵母菌和黴菌血液培養	需氧血瓶：藍色 厭氧血瓶：紫色 每瓶請加入各 5mL 血液
			適用於小兒血液培養	每瓶請加入 1~3mL 之血液
藍頭管		3.2% sodium citrate	PT, APTT, FDP, Fibrinogen, Antitrombin III, Protein C, Protein S	*血量請抽至試管標示處 (▲) 1.8 mL
黃頭管		Activator & Gel Separator	血清學檢查	
綠頭管		Li Heparin & Gel Separator	<u>一般生化檢驗項目、</u> 急作生化項目 Ammonia*	* Ammonia 冰浴立即送檢

容器名稱	圖示	添加物	適用檢驗項目	注意事項/補充說明
紫頭管		K2 EDTA	CBC, DC, Eosino count, HbH preparation, RBC morphology, Reticulocyte, Blood typing, Rh typing, 備血 (10 mL)	
灰頭管		Potassium oxalate/NaF	Glucose, Lactate*	* Lactate 冰浴立即送檢
黑頭管		3.2% sodium citrate	ESR	血量請抽至試管標示線處
藍頭 紫標 籤		K2 EDTA	Zn, Cd, Hg, As, Pb 等項重金屬檢驗	
尿液 收集 盒			尿液檢查	取中段尿 10 mL

容器名稱	圖示	添加物	適用檢驗項目	注意事項/補充說明
糞便收集盒			糞便檢查 Ademoviurs Ag	取一花生米大小
		保存緩衝液	免疫法 (FiOB)	置於避光外袋保存
萬用收集盒			尿液培養 痰液培養 體液培養	
<u>CSF</u> <u>專用</u> <u>管</u>			<u>CSF 檢體</u>	
TB 專用 管			TB 培養	
需氧 傳送 管		Disodium phosphate Sodium chloride Sodium thioglycollate Age, dis-H <sub>2</sub> O	需氧培養之檢體專用	

容器名稱	圖示	添加物	適用檢驗項目	注意事項/補充說明
厭氧傳送管		Disodium phosphate Sodium chloride Sodium thioglycollate Age, dis-H <sub>2</sub> O, 活性碳	厭氧培養之檢體專用	除了尿道、呼吸道、生殖道、耳、眼等處檢體，需作厭氧培養檢體
病毒專用管			適用於 SARS、腸病毒、麻疹、德國麻疹、先天性德國麻疹、流行性感冒病毒	
Influenza 專用拭子			Influenza virus 檢查	
Strep. A 專用拭子			Streptococcus Group A 檢查	
Adeno 專用拭子			Adenovirus 檢查	
RSV 專用拭子			呼吸道融合病毒檢查	
病毒保存管			<u>病毒核酸檢測</u>	

容器 名稱	圖示	添加物	適用檢驗項目	注意事項/補充說明
<u>COVI</u> <u>D-19</u> <u>抗原</u> <u>專用</u> <u>拭子</u>			<u>COVID-19 抗原檢測</u>	